

N95マスクのつけ方（くちばし型）



①マスクを上下に下げ、ノーズワイヤーにゆるいカーブをつける



②人差し指と親指で2本のゴムバンドを分ける



③ゴムバンドを指で持ちながら、顎の下にマスクを当てる



④ゴムバンドを引き上げ、頭頂部と首の後ろにバンドをかける



⑤2本のゴムの角度は90度になるようにする



⑥ノーズワイヤを指で押し当て、鼻の形に合わせ、ユーザーシールチェックを行う。