

N95マスクのつけ方（3つ折）




①マスクの上下を確認し、
広げます。ノーズワイヤ
にゆるやかなカーブをつ
ける

②鼻とあごを覆う



③マスクを押さえながら上
ゴムバンドを頭頂部へ、
下ゴムバンドを首まわり
につける

④マスクを上下に広げ、鼻
とあごを確実に覆う

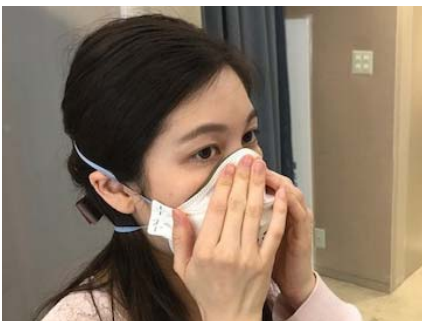

⑤両手の指で鼻あてが鼻に
密着するように軽く押す

⑥両手でマスクを覆い、空
気漏れをチェックして密
着のよい位置にマスクを
合わせる